



LASER ENDOLIFT

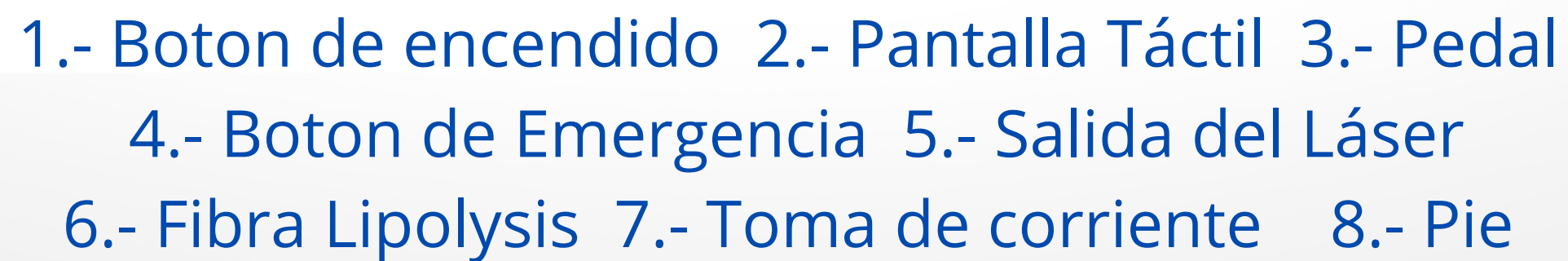

1.- Botón de encendido



PANTALLA

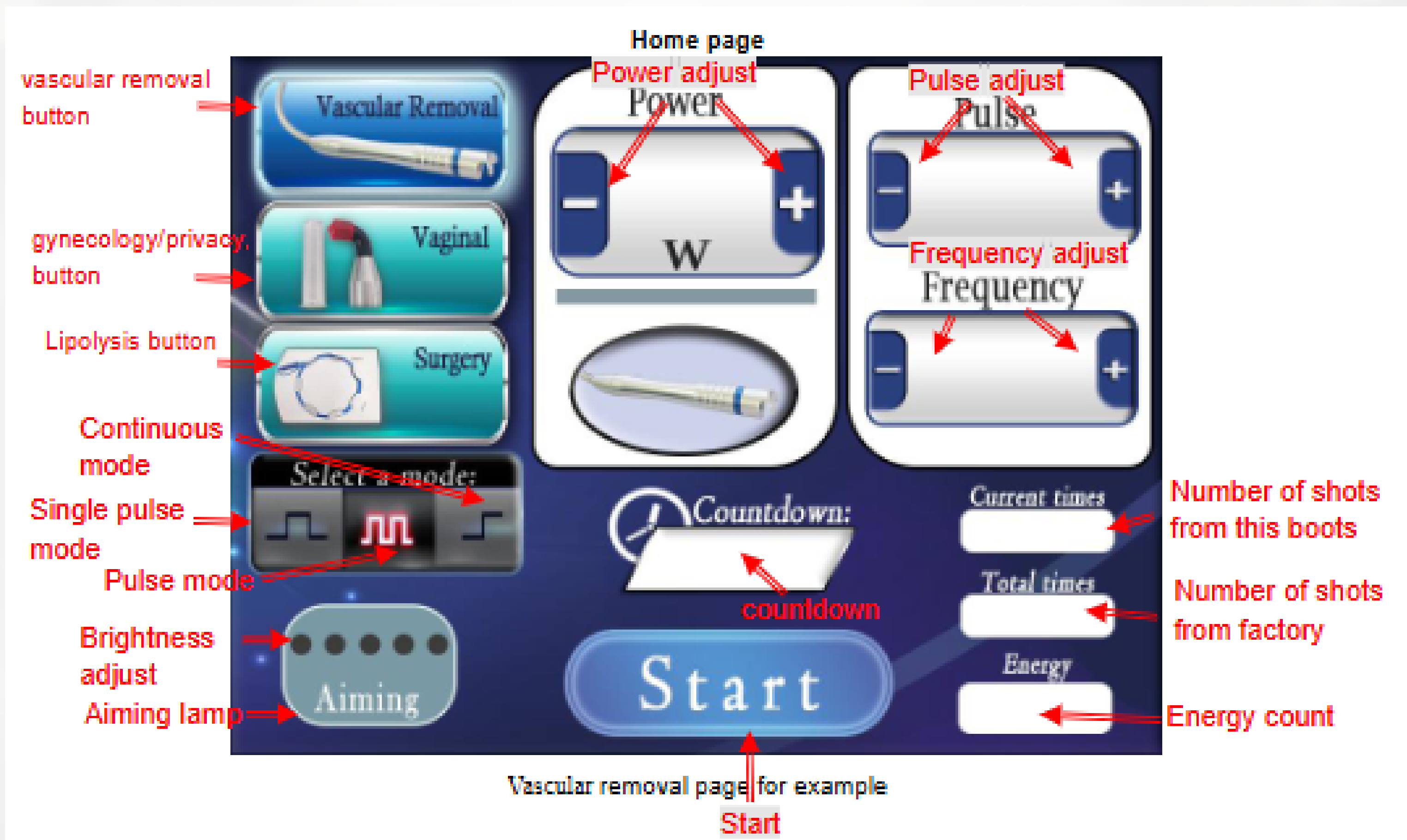

FUNCIONES

Eliminación Vascular

Ginecología

Lipólisis, EVLT

Elimina todo tipo de arañas
vasculares y venas vasculares
del cuerpo

1

Esterilización y
antiinflamatorio, hongos,
herpes, cervicitis
Equilibra el valor del PH

2

Elimina con precisión la grasa en zonas
específicas
Levantamiento facial, reafirmación y
eliminación de líneas de expresión
Perfilamiento de mandíbula y cuello

3

ZONA DE APLICACIÓN

Periocular, ojera/ bolsa de ojos

Cara: Perfilamiento Facial
Lifting Facial

Cara: Pápada / Lifting

Parámetros

Potencia: 3 a 5 W.
Ancho de pulso: 10 a 15 ms.
Frecuencia: 3 a 5 MHz.
Número de pases: 5 a 7 veces.
Modo pulsado

Potencia: 8 a 12 W.
Ancho de pulso: 15 a 20 ms.
Frecuencia: 4 a 5 MHz.
Número de pases: 8 a 10 veces.
Modo pulsado

Potencia: 10 a 15 W.
Ancho de pulso: 20 a 25 ms.
Frecuencia: 4 a 5 MHz.
Número de pases: 8 a 10 veces.
Modo pulsado

ZONA DE APLICACIÓN

Brazos

Abdomen

Parámetros

Potencia: 15 a 20 W.
Ancho de pulso: 25 a 45 ms.
Frecuencia: 5 a 7 MHz.
Número de pases: 10 a 15 veces.
Modo pulsado / continuo

Potencia: 15 a 23 W.
Ancho de pulso: 30 a 50 ms.
Frecuencia: 5 a 8 MHz.
Número de pases: 10 a 15 veces.
Modo pulsado / continuo